

Тест полоски для определения антител к SARS-CoV-2

(Метод коллоидного золота)



Тест-полоска Sinocare для определения антител к SARS-CoV-2 - это быстрый, точный и простой в обращении. Комбинированный набор IgG-IgM для анализа антител с использованием иммунохроматографического анализа коллоидного золота, который может качественно, одновременно выявлять антитела IgM и IgG против вируса SARS-CoV-2 в крови человека в течении 15-20 минут.

Быстрое обнаружение и Простота в использовании

Новый вирус, известный как SARS-CoV-2 (также известный как COVID-19 или 2019-nCoV), РНК-вирус семейства коронавирусов. Комбинированный тест на антитела IgG-IgM подходит для быстрой диагностики и скрининга (первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления случаев заболевания) для предотвращения вторичной передачи и обеспечить своевременное лечение инфекции.

Метод	ОТ-ПЦР	Тест на антитела IgG-IgM
Образец	Мазок	Цельная кровь/Сыворотка/Плазма
Время теста	Более 2-3 часов	В течении 15-20 минут
Действие	Профессионально	Просто
Условия выявления	Требуется специальное оборудование	Пункт оказания мед.помощи
Точность	Около 50% ложных результатов	IgM-IgG тест 90%

Changsha Sinocare Inc.

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО Клиника «Здоровье»
 Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1
 Тел.: +7 (499) 252-41-35, <https://medcentr.biz>



Точность результатов

1. Клиническая оценка


Всего тест был проведен на 140 испытуемых, включая 60 отрицательных пациентов, 60 подтвержденных пациентов и 20 вылеченных пациентов.

Тип образца	Чувствительность	Специфичность
Сыворотка/Плазма	96.3%	98.3%
Цельная кровь	95.0%	98.3%

2. Точность

	Стабильность	Промежуточная точность
Отрицательный уровень совпадений (-/-)	100%	100%
Положительный уровень совпадений (+/+)	100%	100%

Удобная процедура и визуальный результат

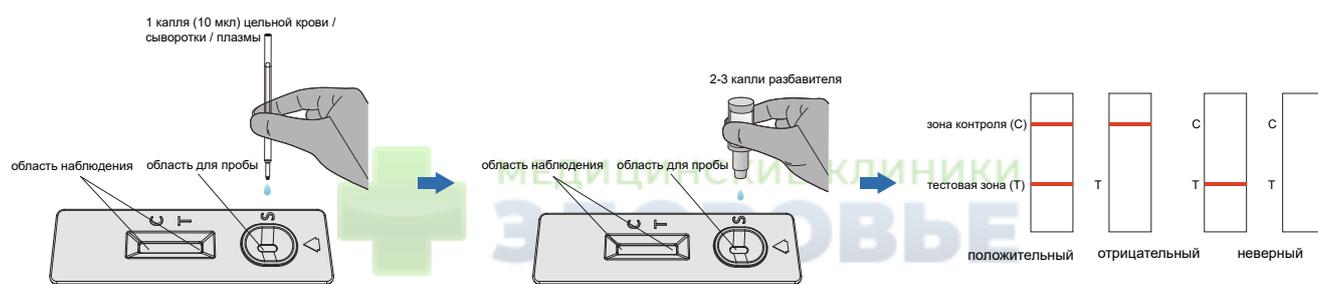

Спецификация

Продукт	Тест полоска для определения антител к SARS-CoV-2
Материал	Цельная кровь / сыворотка / плазма
Примерный объем	1 капля (10 мкл) цельной крови / сыворотки / плазмы
Время теста	15-20 минут
Упаковка	25 тест полосок в коробке; 5 тест полосок в коробке;
Условия хранения	Хранить в упаковке при температуре от 4°C до 30°C вдали от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

